



The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The text is centered and consists of four lines, each underlined with a blue horizontal line.

***PRODUCTOS PARA***  
***CUIDADO***  
***AVANZADO DE***  
***HERIDAS***

- SOLUCIONES PARA ASEPSIA/LIMPIEZA DE HERIDAS
- HIDROCOLOIDES C/S BORDE ADHESIVO
- ESPUMAS C/S BORDE ADHESIVO C/S PLATA IÓNICA
- GASAS CON BORDES ADHESIVO C/S RECUBIERTA DE RESINA
- APÓSITOS & PARTÍCULAS DE COLÁGENO
- HIDROGELES C/S SULFADIAZINA DE PLATA EN GEL, SPRAY & GASAS SATURADAS
- ALGINATOS DE CALCIO C/S PLATA IÓNICA, & ALGINATOS CON MIEL DE MANUKA
- GASAS SATURADAS CON MIEL DE MANUKA DE GRADO MÉDICO
- APÓSITOS DE ESPECIALIDAD PARA OSTOMÍA, TRAQUEOTOMÍA & HERIDAS INTRAVENOSAS

# WOUND CLEANSER SPRAY BOTTLE



## Ingredientes activos:

- Lauril Sulfato de Sodio
- Lauril glucósido
- Betaína de Coco - 1%

El limpiador de heridas Gentell es una solución PH neutra, que no requiere enjuague y no genera irritación; promueve la cicatrización de a herida ayudando en el proceso de desbridamiento y eliminación de contaminantes y exudados. El Limpiador de heridas se puede utilizar para eliminar desechos, contaminantes y exudados independientemente de la etapa de la herida.

- ✓ Logra eficaz desbridamiento con flujo de 8-10 PSI.
- ✓ No requiere de enjuague.
- ✓ Solución estable por 2 años, reemplaza a otras soluciones salinas que deben desecharse en 24 horas.

# HYDROGEL WOUND DRESSING & SPRAY GEL



El Hidrogel de Gentell es gel hidratante a base de Aloe Vera que protege la zona de la herida. Debido a que utiliza menos agua que otros hidrogeles, el hidrogel de Gentell es más viscoso y menos fluido. El Aloe es una fuente de Acemanano, en adición a otros mono y poli sacáridos, aminoácidos, glicoproteínas, vitaminas y enzimas.

- ✓ Hidrata a la herida por lo menos por 24 horas.
- ✓ Su fórmula completamente transparente permite una buena visualización de la herida y su diagnóstico.
- ✓ Spray ajustable permite alcanzar áreas profundas de la herida.

*Excelente en heridas de grado 1-4 con pequeño a bajo drenaje, úlceras de piel diabética, úlceras venosas, quemaduras de primer y segundo grado, incisiones post-quirúrgicas, cortes y abrasiones.*

- ✓ También disponible en Frascos con tapa (Ag) y Gasas saturadas de hidrogel.
- Trietanolamina
- Propilenglicol
- Extracto de Aloe Vera
- Imidazolidinil urea
- Metilparabeno
- Alantoína
- Sorbitol
- Carbómero

# HYDROGEL SATURATED GAUZE



*Excelente en heridas de grado 1-4 con pequeño a bajo drenaje, úlceras de piel diabética, úlceras venosas, quemaduras de primer y segundo grado, incisiones post-quirúrgicas, cortes y abrasiones.*

La Gasa Saturada de Hidrogel de Gentell es gasa de 12 capas completamente saturada de hidrogel para heridas transparente y viscoso. La gasa de hidrogel protege la zona de la herida y crea un ambiente idóneo para el proceso de cicatrización de la herida. El Aloe es una fuente de Acemanano, en adición a otros mono y poli sacáridos, aminoácidos, glicoproteínas, vitaminas y enzimas.

- ✓ La forma más simple de aplicar hidrogel.
- ✓ Gasa saturada de uso único es ideal para prevenir las infecciones.

✓ Su fórmula completamente transparente permite una buena visualización de la herida y su diagnóstico.

- Agua purificada
- Extracto de Aloe Vera
- Sorbitol
- Carbómero
- Trietanolamina
- Propilenglicol
- Imidazolidinil urea
- Metilparabeno
- Alantoína

# HYDROGEL 4OZ TUBE WITH SILVER



El Hidrogel con Plata (Ag) de Gentell es gel para heridas antimicrobiano que combina las propiedades únicas de la sulfadiazina de plata con el Hidrogel Gentell a base de Aloe Vera. Investigaciones sugieren que la sulfadiazina de plata reduce la carga bacteriana de bacterias gram-positivas y gram-negativas.

- ✓ Formulado con 1% de sulfadiazina de plata con efecto de amplio espectro antimicrobiano.
- ✓ Tratamiento a base de plata eficiente en costo.

✓ La Plata inhibe las bacterias resistentes a otros agentes antimicrobianos, sin dañar al tejido sano.

Ingredientes:

- Agua purificada
- Extracto de Aloe vera
- Sorbitol
- Sulfadiazina de Plata
- Carbómero
- Trietanolamina
- Propilenglicol
- Imidazolidinil urea
- Metilparabeno
- Alantoína

# HYDROGEL SATURATED GAUZE WITH SILVER



*Excelente en heridas crónicas, úlceras por presión de estados 1-4, quemaduras de primer y segundo grado, úlceras venosas y heridas secas a mínimamente exudativas.*

La Gasa Saturada de Hidrogel con Plata (Ag) de Gentell es gasa de 12 capas completamente saturada de hidrogel para heridas viscoso e infundido de plata. La gasa de Hidrogel Ag protege la zona de la herida y crea un ambiente idóneo para el proceso de cicatrización de la herida. La sulfadiazina de plata reduce la carga microbiana de bacterias gram-positivas y gram-negativas.

- ✓ La forma más simple y eficiente en costo para aplicar Sulfadiazina de Plata.
- ✓ Gasa saturada de uso único es ideal para prevenir las infecciones.
- ✓ Plata inhibe las bacterias resistentes a otros agentes antimicrobianos, sin dañar al tejido sano.

## Ingredientes:

- Agua purificada
- Extracto de Aloe Vera
- Sorbitol
- Sulfadiazina de Plata
- Carbómero
- Trietanolamina
- Propilenglicol
- Imidazolidinil urea
- Metilparabeno
- Alantoína

# MVP TRANSPARENT FILM DRESSING

El Apósito de Film transparente de Gentell es una membrana transparente permeable al vapor y a la humedad; cuenta con una capa de adhesivo acrílico e hipo-alérgico que puede ser utilizado para cubrir heridas de baja exudación. El Apósito de film transparente de Gentell es no-absorbente y estéril; es permeable al vapor, humedad y oxígeno, pero impermeable a las bacterias.

- ✓ Permite el fácil monitoreo de la herida sin remover el apósito.
- ✓ Su borde no abrasivo facilita el posicionamiento correcto del film.
- ✓ Membrana flexible se ajusta bien a la piel y al cuerpo.




También como apósito secundario como un apósito secundario en casos de:

- *Úlceras por presión de grado I y II*
- *Abrasiones*
- *Desgarros de piel*
- *Protección contra la fricción*
- *Humedad excesiva*
- *Incisiones quirúrgicas.*

# BORDERED GAUZE DRESSING

La Gasa con Borde Adhesivo de Gentell es un apósito para heridas multipropósito que ahorra valioso tiempo a la enfermera y es gentil a la piel. El apósito cuenta con una almohadilla no adherente que no se pega a la herida; a su vez, una cinta adherente sostiene a un hilado biselado en posición firme para crear un apósito seguro y comfortable.

- ✓ Sirve como apósito primario o secundario.
- ✓ Hilado gentil hipo alergénico permite que la piel respire.
- ✓ Tipo de cinta adhesiva reduce rasgados de piel.

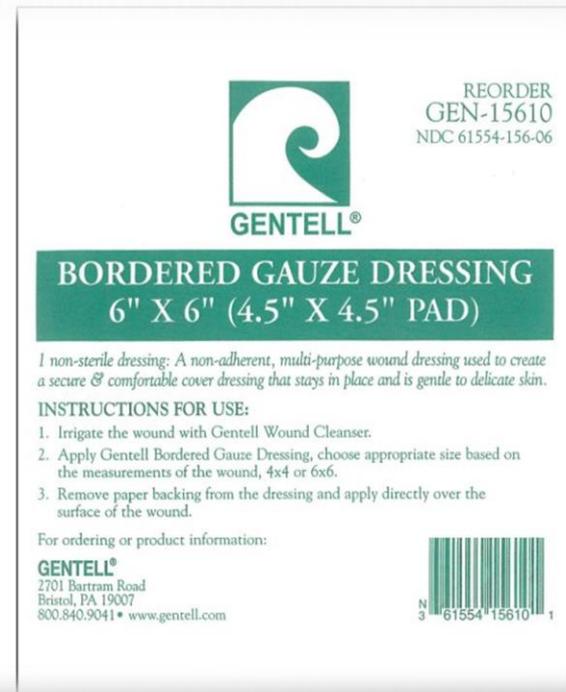

El Apósito Comfortell® de Gentell es un apósito con cubierta externa de resina, cuatro distintivas capas y un borde adhesivo resistente al agua. Comfortell combina una capa absorbente con una barrera permeable selectiva que permite que la herida respire mientras que mantiene fuera a los contaminantes. Comfortell puede utilizarse como un apósito primario sobre una zona de herida postoperatoria, suturas, o rasgados de piel; también puede ser utilizado como un apósito secundario sobre gasas impregnadas o ungüentos enzimáticos.

- ✓ Borde adhesivo resistente el agua permite que paciente sea bañado y aseado sin inconvenientes.
- ✓ Cuatro superficies diferenciadas absorben de ligero a moderado exudado de la herida.

# COMFORTELL® DRESSING



El Apósito Hidrocoloide Dermatell® de Gentell está conformado por una capa hidrocoloide adjunta a un borde adhesivo resistente al agua que es flexible y se adecúa muy bien al cuerpo. Los suaves y flexibles apósitos Dermatell® mejoran la protección y confort del paciente acelerando el proceso de cicatrización al absorber los exudados y promover el desbridamiento natural. Los apósitos Dermatell® son más eficientes cuando se mantienen sobre la herida por un mínimo de tres días.

- ✓ Capa hidrocoloide flexible absorbe el agua y crea un gel y humedad idónea para el proceso de sanación.
- ✓ Borde resistente al agua permite el aseo normal del paciente.
- ✓ Su diseño de bordes biselados evita que éstos se levanten.


# DERMATELL® HYDROCOLLOID DRESSING




# CALCIUM ALGINATE DRESSING

Los Apósitos de Alginato de Calcio de Gentell son una estructura de avanzada conformada por fibras o filamentos de alginato; son estériles y cómodos, y cuentan con una gran capacidad de absorción. Los apósitos de alginato absorben y colectan los exudados de la herida y a su vez proveen un ambiente de humedad idóneo. Una reacción entre el calcio del apósito y el sodio del exudado de la herida genera una sustancia gelatinosa que promueve el proceso de cicatrización.

- ✓ Absorben uniformemente y recolectan hasta 20 veces su peso en residuos exudativos.
- ✓ Pueden ser moldeados o adecuados al tamaño exacto de la herida.
- ✓ Fácil de remover, no se adhieren al tejido cicatrizante de la herida.

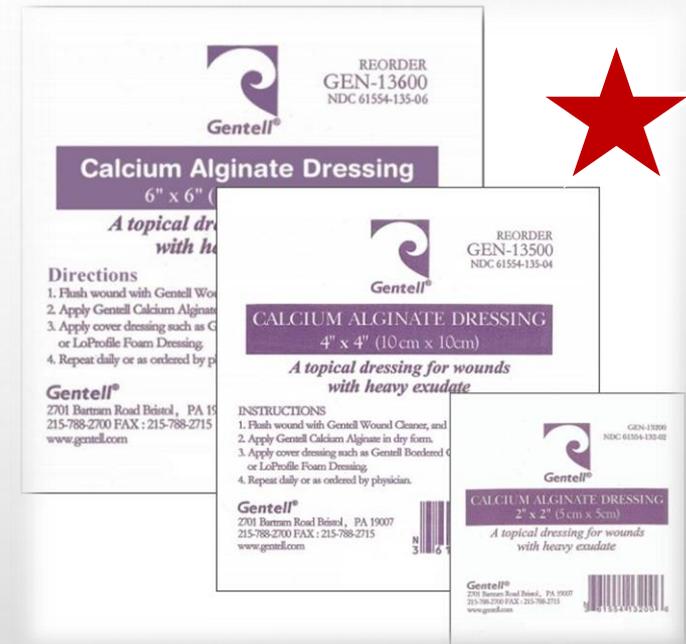


# CALCIUM ALGINATE 12" ROPE DRESSING

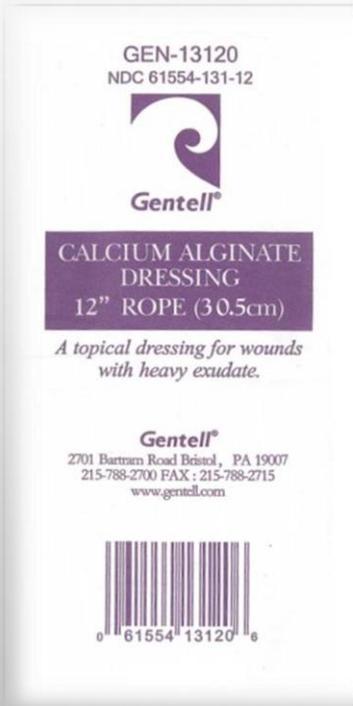

La Soguilla de Alginato de Calcio de Gentell es una estructura de avanzada conformada por fibras o filamentos de alginato; es estéril y cómoda, y cuenta con una gran capacidad de absorción. Los apósitos de alginato absorben y colectan los exudados de la herida y a su vez proveen un ambiente de humedad idóneo. Una reacción entre el calcio del apósito y el sodio del exudado de la herida genera una sustancia gelatinosa que promueve el proceso de cicatrización.

- ✓ Soguilla puede ser fácilmente cortada, doblada o moldeada de acuerdo al tamaño exacto de la herida.
- ✓ Absorbe uniformemente y recolecta hasta 20 veces su peso en residuos exudativos.
- ✓ Los fluidos ingresan rápidamente a la soguilla minimizándose el chance de maceración.

# CALCIUM ALGINATE WITH SILVER DRESSING

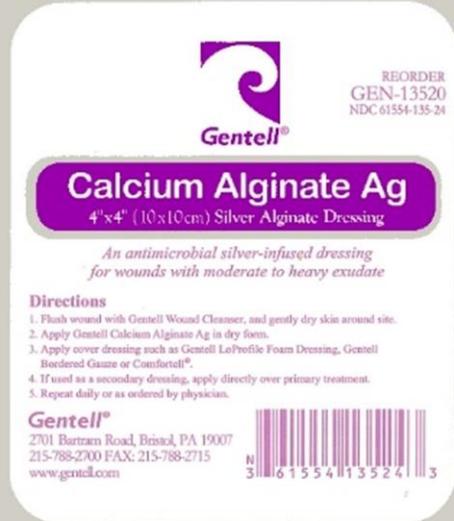

Los Apósitos de Alginato de Calcio y Plata (Ag) de Gentell son una estructura de avanzada conformada por fibras o filamentos de alginato; son estériles y cómodos y cuentan con una gran capacidad de absorción. Estos apósitos de avanzada combaten a las bacterias y un amplio espectro de micro-organismos mientras que absorben los exudados de la herida manteniendo un ambiente de humedad idóneo. Una continua liberación de plata (Ag) y una reacción entre el calcio del apósito y el sodio del exudado de la herida, crea una sustancia gelatinosa que combate la infección y promueve el proceso de cicatrización.

*Aplicar en formato seco sobre heridas superficiales que pueden incluir :*

- *Úlceras en las extremidades.*
- *Úlceras por presión*
- *Úlceras de pie diabético*
- *Heridas quirúrgicas.*

- ✓ Absorben uniformemente y recolectan hasta 20 veces su peso en residuos exudativos con una liberación sostenida de plata (Ag) antimicrobiana.
- ✓ Reduce el olor primordialmente causado por las bacterias.

# CALCIUM ALGINATE WITH SILVER ROPE DRESSING

La Soguilla de Alginato de Calcio y Plata (Ag) de Gentell es una estructura de avanzada conformada por fibras o filamentos de alginato; es estéril y cómoda, y cuenta con una gran capacidad de absorción. Este apósito de avanzada combate a las bacterias y un amplio espectro de micro-organismos mientras que absorbe los exudados de la herida manteniendo un ambiente de humedad idóneo. Una continua liberación de plata (Ag) y una reacción entre el calcio del apósito y el sodio del exudado de la herida, crea una sustancia gelatinosa que combate la infección y promueve el proceso de cicatrización.

- ✓ Liberación controlada de plata (Ag) provee protección antimicrobiana a la herida.
- ✓ Soguilla puede ser fácilmente cortada, doblada o moldeada de acuerdo al tamaño exacto de la herida.
- ✓ Absorbe uniformemente y recolecta hasta 20 veces su peso en residuos exudativos.



# LO PROFILE BORDERED FOAM DRESSING



El Lo-Profile Foam Plus de Gentell es un apósito resistente al agua que incluye una espuma altamente absorbente con diseño de isla. Su estructura densa y robusta protege a la herida de amenazas externas y su textura porosa es altamente absorbente. Su borde no abrasivo mantiene a la espuma en lugar, creando una barrera anti-bacterial resistente al agua para proteger a la herida.

- ✓ Absorbe hasta 20 veces su peso en exudados y drenaje.
- ✓ Barrera anti-bacterial resistente al agua provee protección contra la incontinencia.
- ✓ Excelente alivio de presión para áreas de piel recientemente cicatrizadas.

El Apósito de Espuma con Corte sin Bordes de Gentell es un apósito absorbente pre-cortado sin borde adhesivo y fenestración en forma de U, ideal para zonas de traqueotomías, catéteres, tubos de alimentación o zonas de heridas mayores que requieran absorción moderada a pesada. Este apósito de espuma súper absorbente, previene la maceración de la piel manteniendo la herida seca.

- ✓ De muy fácil aplicación sobre la zona de traqueotomías y otro tipo de áreas comprometidas por intubación con moderado a intenso drenaje.
- ✓ Contiene espuma súper absorbente para ayudar a mantener la herida seca y prevenir maceración.
- ✓ Al ser libre de borde adhesivo,

# SPLIT DRAIN FOAM DRESSING



*Puede ser cortado a medida para ser aplicado sobre úlceras por presión, heridas crónicas y/o heridas parciales o de espesor completo de estados 2-4.*


# CIRCULAR SPLIT DRAIN FOAM DRESSING



El Apósito de Espuma Circular con Corte de Gentell es un apósito absorbente pre-cortado con borde adhesivo y fenestración en forma de U, ideal para zonas de ostomías, catéteres y tubos de alimentación. Este apósito de espuma súper absorbente, previene la maceración de la piel manteniendo la herida seca. La cinta resistente al agua e hipo-alérgica, permite que la piel respire y facilita su aplicación, ahorrando valioso tiempo a la enfermera.

- ✓ De muy fácil aplicación sobre la zona de ostomías, catéteres, y otro tipo de áreas comprometidas por intubación con moderado a intenso drenaje.
- ✓ Contiene espuma súper absorbente para ayudar a mantener la herida seca y prevenir maceración.
- ✓ Gentil, de encaje hilado, hipo-alérgico y con cinta resistente al agua, permite que la piel respire y


# WATER PROOF FOAM DRESSING

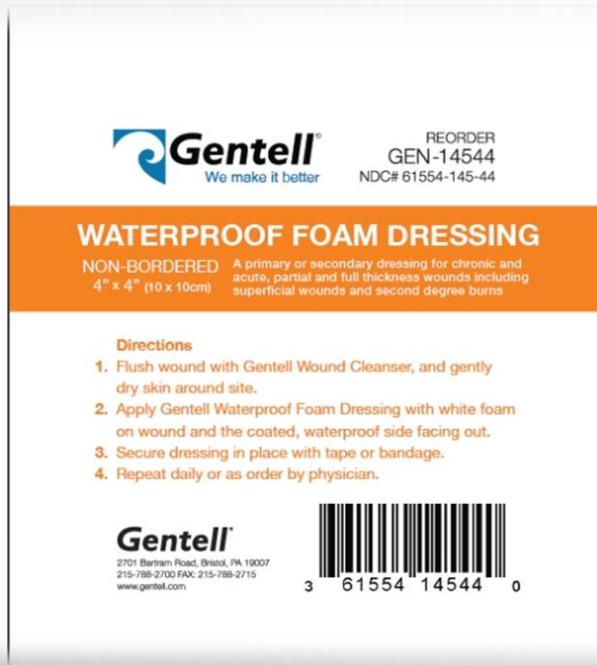

El Apósito de Espuma resistente al Agua de Gentell es un apósito para heridas primario o secundario indicado para heridas crónicas o agudas, de exudado moderado a pesado, parciales o de espesor completo incluyendo heridas superficiales y quemaduras de segundo grado.

- ✓ Espuma súper absorbente mantiene a la herida seca evitando maceración.
- ✓ Reduce presión en la herida.
- ✓ Su gran flexibilidad permite amoldarse a la forma de la herida.

# SILICONE FOAM BORDERED DRESSING

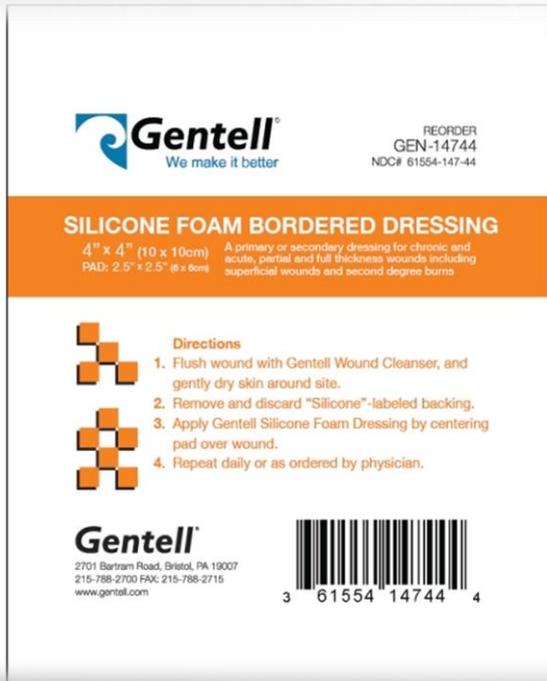

El Apósito de Espuma de Silicona con Borde Adhesivo de Gentell es un apósito que puede ser utilizado como tratamiento primario o secundario sobre heridas crónicas y agudas, parciales o de espesor completo, incluyendo también heridas superficiales y quemaduras de segundo grado.

- ✓ Capa de silicona retira el fluido de la herida y las áreas de piel circundantes.
- ✓ Ideal para pacientes con pieles frágiles o muy sensibles al reemplazo de apósitos.
- ✓ Borde adhesivo se aplica fácilmente.

# BORDERED FOAM DRESSING AG (SILVER)

El Apósito de Espuma y Plata con Borde Adhesivo de Gentell es una espuma que contiene plata iónica que ofrece un excelente efecto antibacteriano. Es ideal para el tratamiento de heridas con abundante exudado y heridas crónicas causadas por infección bacteriana, incluyendo úlceras en extremidades y piernas, lesiones por presión, heridas de pie diabético, quemaduras de segundo grado, heridas postquirúrgicas y abrasiones de la piel.



- ✓ Ofrece liberación controlada de plata iónica para proveer un efecto antibacteriano sostenible.
- ✓ Inhibe infección de amplio espectro.
- ✓ Almohadilla de espuma altamente absorbente ayuda a mantener un ambiente con humedad propicia para la curación.
- ✓ Puede ser utilizado como un apósito primario.

# SUPER ABSORBENT DRESSING

El Apósito Súper Absorbente de Gentell ofrece excelente capacidad de absorción para el tratamiento de heridas con moderado a pesado exudado. El apósito está conformado por una cubierta no-tejida respirable y resistente al agua, una almohadilla súper absorbente y una superficie no tejida de hidro-penetración o silicona. Es ideal para úlceras o heridas en extremidades (piernas), lesiones por presión, heridas no-infectadas de pie diabético y heridas quirúrgicas.

- ✓ Diseño de multi-capas que absorbe eficazmente el exudado y promueve la sanación de la herida.
- ✓ Minimiza el riesgo de maceración y fuga.
- ✓ Puede ser aplicado bajo terapia de compresión.
- ✓ Puede ser utilizado como un apósito primario.



# HONEY GAUZE DRESSING



El Apósito de Miel de Manuka de Grado Médico de Gentell es un apósito primario que se puede utilizar en heridas parciales o de espesor completo, úlceras en extremidades, úlceras por presión, quemaduras de primer o segundo grado, úlceras de pie diabético, abrasiones menores y laceraciones.

- ✓ Gasa impregnada con 100% miel de abeja de “manuka” (leptospermum) de grado médico.
- ✓ La forma más simple de aplicar miel de abeja de grado médico.
- ✓ Ayuda a crear la humedad idónea para sanar quemaduras y heridas.
- ✓ Contribuye eficazmente en el proceso de desbridamiento auto lítico.

# HONEY ALGINATE DRESSING

El Apósito de Alginato de Calcio y Miel de Manuka de Grado Médico de Gentell es una estructura de avanzada conformada por fibras o filamentos de alginato impregnado con 100% miel de abeja de “manuka” (leptospermum) de grado médico. El Alginato absorbe el exudado mientras que la miel ayuda a crear la humedad idónea para cicatrizar heridas complicadas.

- ✓ Apósito de Alginato de Calcio impregnado con 100% miel de abeja de “manuka” (leptospermum) de grado médico.
- ✓ Ayuda a crear la humedad idónea para sanar quemaduras y heridas.
- ✓ Contribuye eficazmente en el proceso de desbridamiento auto lítico.



REORDER  
GEN-16200  
NDC# 61554-162-02

## HONEY ALGINATE DRESSING

Calcium alginate dressing impregnated with 100% Leptospermum (Manuka) Medical Grade Honey

2" x 2"  
(5 x 5cm) Helps promote moist healing in challenging wounds and burns, and assists in autolytic debridement.



**Directions**

1. Flush wound with Gentell Wound Cleanser, and gently dry skin around site.
2. Apply Gentell Honey Alginate.
3. Apply cover dressing such as Gentell Foam Dressing, Gentell Bordered Gauze or Gentell Comfortell.
4. Repeat daily or as order by physician.

Single use only

**Gentell**  
2701 Bertram Road, Berks, PA 19007  
215-788-2700 FAX: 215-788-2715  
www.gentell.com



# COLLAGEN WOUND DRESSING

La Matriz de Colágeno de Gentell es un apósito primario especialmente indicado para heridas crónicas, difíciles de sanar, heridas con exudado mínimo a pesado, parciales o de espesor completo, granuladas o necróticas, o quemaduras de segundo grado. No utilizarse en caso de pacientes alérgicos a materiales derivados de los bovinos.

- ✓ Reduce eficazmente los altos niveles de metaloproteasas de matriz (MMPs), responsables de destruir el tejido conectivo.
- ✓ Ideal para heridas crónicas difíciles de sanar.
- ✓ Disponible en partículas de colágeno y en apósitos de convenientes medidas.



El Apósito de Emulsión de Aceite con Aceite Mineral USP\* de Gentell es un apósito comfortable ideal para heridas con ligero drenaje, pequeñas quemaduras, laceraciones, o abrasiones. Es libre de látex y no adherente.

- ✓ Apósito impregnado con aceite mineral USP.
- ✓ Ideal para heridas con ligero drenaje, pequeñas quemaduras, laceraciones, o abrasiones.
- ✓ Libre de látex, no adherente.

\* USP es la Farmacopea de Los Estados Unidos de Norteamérica, que indica el estándar para ciertos medicamentos.

# OIL EMULSION DRESSING



# PETROLATUM DRESSING

El Apósito de Petrolato de Gentell es una gasa de malla fina impregnada con petrolato puro, libre de látex y sin adherentes.


- ✓ Malla extra fina impregnada con petrolato o vaselina.
- ✓ Ideal para heridas con ligero drenaje, pequeñas quemaduras, laceraciones, o abrasiones.
- ✓ Libre de látex, no adherente.



# XEROFORM DRESSING

El Apósito de Xeroform de Gentell es una gasa de malla fina impregnada con 3% de Bismuto Tribromofenato en una mezcla de petrolato o vaselina; es libre de látex y sin adherentes.

- ✓ Malla extra fina impregnada con 3% de Bismuto Tribromofenato en una mezcla de petrolato o vaselina.
- ✓ Ideal para heridas con ligero drenaje, pequeñas quemaduras, laceraciones, o abrasiones.
- ✓ Libre de látex, no adherente.

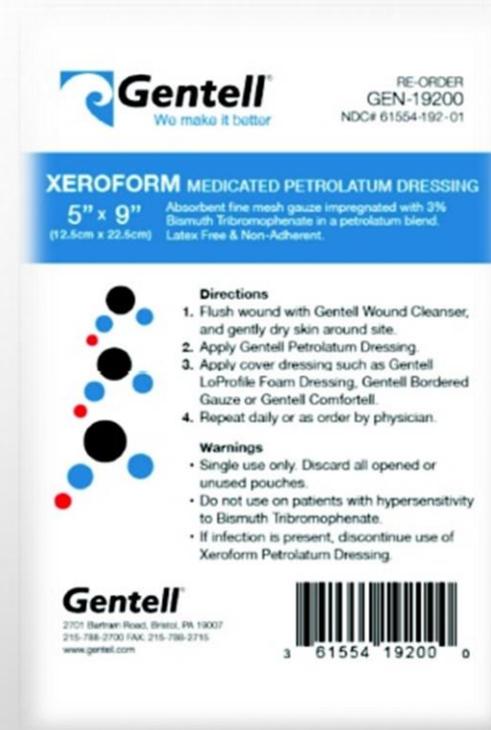

# FIX TAPE 2 INCHES X 11 YARDS



La Cinta de Fijación de Gentell es un cinta de tela no tejida utilizada para la fijación de apósitos, tubos y catéteres con papel de protección muy fácil de retirar.

- ✓ Cinta para fijación de apósitos, tubos y catéteres.
- ✓ Cinta de tela no tejida con soporte de papel autoadhesivo fácil de remover.
- ✓ Libre de látex.

The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it, primarily concentrated in the top-left and bottom-right corners. The text is centered and consists of three lines, each underlined with a solid blue line.

***PRODUCTOS PARA***  
***CUIDADO DE LA***  
***PIEL***

- CREMAS DE BARRERA CONTRA HUMEDAD (INCLUYENDO ANTI-FÚNGICAS)
- LIMPIADORES PERINEALES Y DESINFECTANTE DE PIEL
- DESINFECTANTES DE MANOS
- AMBIENTADORES AÉREOS DE GRADO HOSPITALARIO
- VASELINAS / PETROLATOS
- UNGÜENTOS DE VITAMINAS A, D & E
- CREMAS HUMECTANTES
- ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL DEL PACIENTE

# LIQUID CLEAN



El **Liquid Clean de Gentell** es una solución para limpieza antimicrobiana presentada en un conveniente dispensador de no-aerosol. El limpiador de piel libre de enjuague, Liquid Clean humecta y condiciona la piel mientras que remueve desechos y contaminantes. Su ya probado ingrediente antimicrobiano provee una continua barrera de defensa bactericida contra microorganismos que dañan la piel y generan mal olor. Liquid Clean y su placentera fragancia de papaya es ideal para casos de incontinencia.

- ✓ Solución a base de cloruro de bencetonio remueve gérmenes, contaminantes y desechos de piel sin agresividad al paciente.
- ✓ Limpia, humecta y condiciona la piel en forma eficiente.
- ✓ Controla el olor en casos de pacientes con incontinencia.

# PERINEAL SPRAY



El Spray Perineal de Gentell limpia gentilmente la piel de residuos corporales y elimina el olor mientras que limpia integralmente la zona perineal o de ostomía. Puede ser aplicado directamente a la zona afectada para lograr refrescar áreas calientes sobre la piel. Nuestra fórmula especial de PH balanceado no causa irritación y es óptima para cuidado de ostomías e incontinencia.

- ✓ Formulado con Aloe Vera.
- ✓ De PH neutro.
- ✓ Fórmula libre de enjuague.
- ✓ Neutraliza olores.

# EASE ODOR ELIMINAT OR

El Ease, Supresor de Olores de Gentell elimina olores agresivos y persistentes en el acto. Ease neutraliza los olores biológicos asociados a la orina, las heces y los tejidos necróticos, reemplazándolos con una agradable y gentil fragancia de rosas que se disipa rápidamente en el aire. Eficiente en eliminar todos los olores aéreos, inclusive el humo.

- ✓ Elimina olores aéreos no deseados.
- ✓ De rápido efecto.
- ✓ Al no ser aerosol, no deja residuos resbalosos en suelo.



# HAND SANITIZER

El desinfectante instantáneo de manos de Gentell limpia y desinfecta las manos con un mayor contenido de alcohol que la mayoría de desinfectantes. Formulado con Aloe Vera y Vitaminas A y D, el desinfectante de manos de Gentell también refresca la piel, mientras que elimina el 99.99% de bacterias. Disponible en dos tamaños y opciones de fragancia.

- ✓ No deja una sensación pegajosa después de su uso.
- ✓ Elimina gérmenes sin el lavado tradicional con agua lo que incentiva la regularidad de higiene.
- ✓ Sus contenidos de Aloe Vera y Vitaminas refrescan la piel.



# ANTIBACTERIAL AL HAND SOAP

El Jabón de Manos Anti-bacterial de Gentell está formulado muy gentilmente con una esencia a lavanda y tiene un eficiente efecto anti-bacterial que humecta la piel a medida que limpia. Investigaciones comprueban que la esencia a lavanda contribuye al relajamiento del paciente y produce un efecto calmante y sedativo.

- ✓ Fórmula anti-bacterial muy gentil.
- ✓ Humecta al mismo tiempo que limpia.
- ✓ Agradable y relajante esencia a lavanda.



**Ingrediente Activo:**

- *Triclosan .15%*

Las Cremas de Barrera Protectora Shield & Protect de Gentell forman una barrera protectora que ayuda a aliviar y restaurar la piel seca e irritada. Ofrece una acción terapéutica en contra de la irritación causada por la orina, heces y otras secreciones corporales. Shield & Protect deja a la piel suave y lisa sin causar irritación o un efecto grasoso. Ideal para pieles sensibles. La versión AF (Anti Fúngica) de Shield & Protect ayuda a controlar el malestar causado por infecciones por hongos.

- ✓ Protege a la piel de la irritación.
- ✓ Insoluble al agua por lo que garantiza protección extendida.
- ✓ Aloe Vera y Vitaminas A y D dejan la piel suave y lisa.
- ✓ Versión Antimicótica (Anti Fúngica) AF contiene:

# SHIELD & PROTECT



## Ingredientes:

- *Óxido de Zinc (protector dérmico)*
- *Cetil Dimeticona (protector dérmico)*
- *Sólo versión AF: Clotrimazol Anti Fúngico*

# SUPER MAX

La Crema de Barrera Protectora SuperMax de Gentell evita rupturas en la piel saludable e intacta durante condiciones dérmicas comprometedoras. SuperMax reduce los niveles de humedad notablemente gracias a su fórmula de 16% de Óxido de Zinc y Bálsamo de Perú que forman una barrera protectora y resistente que ayuda a aliviar y restaurar la piel seca e irritada. Contiene también una esencia natural y agradable a vainilla.

- ✓ Máximo poder de protección contra la incontinencia.
- ✓ No bloquea los poros de los pañales permitiendo buena ventilación.
- ✓ De muy fácil aplicación y limpieza.



## Ingrediente Activo:

- *Óxido de Zinc al 16% (protector dérmico)*

# ZINC OXIDE OINTMENT

El Ungüento de Óxido de Zinc de Gentell protege a la piel irritada asociada con la dermatitis por pañal, reduciendo notablemente el enrojecimiento de la piel y su irritación. Producto formulado de acuerdo a los estándares de la Convención de Farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica (USP).

- ✓ Ayuda a curar, calmar y prevenir los casos de dermatitis por pañal.
- ✓ Protege la piel irritada de condiciones asociadas a la dermatitis por pañal causada por excesiva humedad.
- ✓ Su propiedad antiinflamatoria reduce enrojecimiento e irritación en casos de pieles sensibles.
- ✓ Eficaz para tratar casos de envenenamiento dérmico.



## Ingrediente Activo:

- *Óxido de Zinc al 20% (protector dérmico)*

# A, D & E OINTMENT

El Ungüento de Vitaminas A, D y E de Gentell provee protección y confort en casos de pequeños cortes y quemaduras, al igual que en irritaciones de la piel y erupciones cutáneas provocadas por el uso del pañal. Su fórmula a base de Vitaminas A, D, y E sobre una solución de petrolato blanco, calma y reconforta a la piel en casos de fuerte irritación.

- ✓ Ayuda a curar, calmar y prevenir los casos de dermatitis por pañal.
- ✓ Ayuda a curar la piel excesivamente seca e irritada.
- ✓ De fácil y gentil aplicación sobre la piel.
- ✓ Puede ser utilizado para tratar casos de cortes pequeños y quemaduras.



## Ingredientes:

- *Petrolato blanco como protector dérmico*
- *Petrolato*
- *Palmitato*
- *Vitaminas A, D y E*

# PETROLEUM JELLY

La Jalea de Petr leo de Gentell ayuda a tratar y prevenir la escaldadura por pa al. Tambi n ayuda en la protecci n temporal de cortes peque os, raspaduras, quemaduras, insolaci n y piel irritada o maltratada. Especialmente  til para la protecci n contra la humedad de la piel da ada por uso continuo del pa al.

- ✓ Ayuda a prevenir y tratar la escaldadura por pa al.
- ✓ Ayuda a curar piel seca e irritada.
- ✓ Puede ser utilizado para aliviar cortes peque os y quemaduras.



## Ingredientes:

- *Petrolatum Blanco, USP*

**Gentell Bacitracin** es un Ungüento de primeros auxilios que protege contra la infección de la piel en cortes menores y quemaduras.

### Presentación:

Bolsas de papel de aluminio de 5g cada una.

### Opciones:

#### Bacitracina Ungüento con Zinc

##### Ingredientes:

- Petrolatum
- Bacitracina + Zinc

#### Bacitracina Ungüento sin Zinc

##### Ingredientes:

- Petrolatum
- Bacitracina

# BACITRACIN N OINTMENT



# TRIPLE ANTIBIOTIC OINTMENT

La pomada antibiótica triple de Gentell proporciona **Bacitracina, Neomicina y Polimixina B** en una sola aplicación.

- ✓ Protege contra la infección en cortes menores, raspaduras y quemaduras.
- ✓ Convenientes paquetes de 5g para un solo uso.



## Ingredientes:

- *Bacitracina*
- *Neomicina*
- *Polimixina B*

# BODY LOTION

La Crema Corporal de Gentell es una loción gentil, humectante y no irritante que refresca la piel dejándola más saludable. La Crema corporal de Gentell suaviza la piel con aceite mineral, Aloe Vera y una agradable fragancia a vainilla.

- ✓ Previene la resequedad de la piel.
- ✓ Suaviza y humecta la piel.
- ✓ Agradable y fresca esencia a vainilla.

## Ingredientes:

- *Agua purificada*
- *Aceite mineral*
- *Propilenglicol*
- *Cetil dimeticona*
- *Glicerina*
- *Carbómero*
- *DMDM*
- *Hidantoína*
- *Trietanolamina*
- *Fragancia*
- *Aloe Vera*



# SHAMPOO & BODY WASH



El Champú y Gel de Baño de Gentell está formulado con Aloe Vera y no provoca lagrimeo al contacto con los ojos. Su fórmula no-irritante es perfecta para su uso seguido y su efectividad en el resto del cuerpo, lo hace un producto que verdaderamente ahorra tiempo en el lavado general del paciente. El producto crea una mínima cantidad de espuma, lo que facilita el enjuague notablemente, ya que éste puede realizarse sobre la misma cama, en casos de pacientes con movilidad reducida. Su fórmula a base de polímeros y acondicionador de bajos residuos hacen del Gel de Baño Gentell un efectivo humectante de piel.

- ✓ Champú crea mínima cantidad de espuma, lo que facilita el lavado y enjuague del paciente.
- ✓ Fragancia relajante de manzana verde con humectante de Aloe Vera.
- ✓ Fórmula gentil no provoca lagrimeo al contacto con los ojos.

# HOSPITAL BATH & SHAMPOO

El Hospital Bath & Shampoo de Gentell es una fórmula suave que no produce lagrimeo en lo ojos.

- ✓ De uso diario y frecuente.
- ✓ Fórmula libre de lágrimas.
- ✓ Lavado suave, no irritante.
- ✓ Produce espuma calmante y suave.
- ✓ Hecho con Aloe Vera.



# PROTEIN SHAMPOO & CONDITIONER

El Balsam Protein Shampoo & Conditioner de Gettelli está especialmente formulado para hacer una limpieza rápida de cabello.

- ✓ Súper gentil y de uso diario, este shampoo puede ser utilizado también sobre cabellos coloreados.
- ✓ Especialmente formulado para trabajar en sólo 60 segundos.
- ✓ El acondicionar a base de proteína dan cuerpo y brillo al cabello maltratado, opaco y reseco.
- ✓ De pH balanceado.



# BABY SHAMPOO

El Baby Shampoo de Gentell es tan gentil en los ojos como el agua y bastante refrescante tanto en adultos como niños.

- ✓ Especialmente formulado para cabello tratado y frágil.
- ✓ El Baby Shampoo de Gentell limpia gentilmente dejando al cabello suave y con un grato aroma.
- ✓ Fórmula libre de lágrimas.
- ✓ De uso frecuente por niños y adultos.



# BABY OIL

El Baby Oil de Gentell forma una barrera sedosa con aceite mineral enriquecido con lanolina.

- ✓ Fragancia tradicional produce una sensación de calma en niños y adultos.
- ✓ Ayuda a calmar la pañalitis y la resequedad de la piel.
- ✓ Se absorbe rápidamente y ayuda a proteger a la piel delicada.
- ✓ Puro, con buena fragancia y gentil.



## Ingredientes:

- *Aceite mineral*
- *Fragancia*
- *Lanolina*

# BABY POWDER

El Baby Powder de Gentell deja a la piel suave y sedosa.

- ✓ El Baby Powder de Gentell tiene varios usos y es particularmente útil en secar y suavizar la piel durante el uso prolongado de pañales.
- ✓ Talco puro y esterilizado.



## Ingredientes:

- *Talco esterilizado*
- *Fragancia*

# MOUTH WASH



El Enjuague Bucal de Gentell ayuda a mejorar la higiene bucal del paciente. Ofrece una limpieza gentil y relajante que limpia, refresca, y mejora las irritaciones orales. Cuando se utiliza como parte de una buena rutina de higiene oral, ayuda combatir la placa bacteriana, gingivitis, el mal aliento y los gérmenes. Su uso regular también ayuda a prevenir las caries.

- ✓ Libre de alcohol.
- ✓ Libre de azúcar.
- ✓ Hecho con Bicarbonato de Sodio.
- ✓ Refresca el aliento y deja una sensación de limpieza en la boca.
- ✓ Disponible en sabores de Menta Primavera y Canela.

# BODY SPRAY

El Spray Corporal de Gentell ayuda a detener el olor de la sudoración por horas. Es de muy rápida evaporación y de fácil aplicación. No deja residuos que es muy común en los desodorantes de barra. De fácil limpieza en caso fuera necesario.

- ✓ No es pegajoso.
- ✓ De rápida evaporación.
- ✓ Detiene el olor de la sudoración por horas.
- ✓ Fragancias agradables y frescas para Hombre y Mujer.



# SHAVING CREAM



La Espuma de Afeitar de Gentell está formulada para proveer una afeitada al ras y confortable. Su espuma espesa ayuda a proteger a la piel de pequeños cortes, rasguños, escozores, quemaduras, enrojecimiento y otras irritaciones menores de la piel asociadas con la afeitada. Lubrica y alivia a la piel durante toda la afeitada.

- ✓ Enriquecida con Aloe Vera.
- ✓ Formulado para pieles sensibles.
- ✓ Abundante espuma protege de la irritación.